



Manuseio seguro dos produtos Swann-Morton


A forma como uma lâmina cirúrgica é manuseada mesmo antes do uso pode determinar a eficiência da lâmina.

Ao remover uma lâmina da embalagem protetora, certifique-se de que ela não cai numa tigela ou recipiente de metal, pois pode danificar a aresta cortante.

Deve utilizar fórceps ou um porta-agulhas para remover a lâmina da embalagem protetora, certifique-se de que não segura a lâmina pela zona cortante.

Como encaixar a lâmina cirúrgica no cabo

Use o seguinte procedimento para encaixar a lâmina cirúrgica:

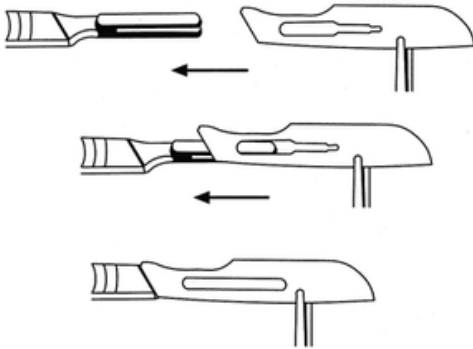

1 - Agarre a lâmina com a ajuda de uma pinça (ou semelhante), evitando o contato com a aresta cortante.

2 - Segure o cabo de bisturi com a outra mão e vire o encaixe da baioneta para cima.


3 - Coloque a lâmina parcialmente sobre o encaixe do cabo e encaixe as ranhuras.

4 - Deslize a lâmina até encaixar na posição correta (vai ouvir um clique).

5 - Para melhorar a montagem, flexione a lâmina levemente para cima ao deslizar sobre o cabo.

Como remover uma lâmina cirúrgica

Use o seguinte procedimento para destacar uma lâmina cirúrgica:

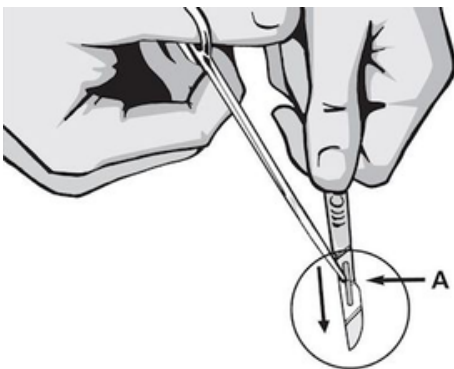

1 - Segure a lâmina com a ajuda de uma pinça ou porta-agulhas no ponto A, certificando-se de que a borda cortante esteja voltada para longe da mão e do corpo.

2 - Certifique-se de que a parte cortante da lâmina esteja virada para baixo e NÃO para outro membro da sua equipa.

3 - Enquanto segura o cabo firmemente, levante a borda traseira da lâmina com a pinça ou porta-agulhas e deslize o cabo.

4 - O método ideal seria um dispositivo de remoção de lâminas Swann-Morton.